

# 検査及び 判定の方法

## 【検体の採取方法】




※10cmほど挿入

◆鼻咽頭ぬぐい液の採取方法  
滅菌綿棒を鼻腔孔から耳孔を結ぶ線にほぼ平行に鼻腔底に沿ってゆっくり挿入し、鼻咽頭を数回擦過してぬぐい液を採取し、検体とします。

## 【検体の抽出・測定操作方法】

1

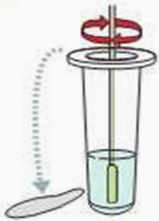

検体抽出液入りチューブのアルミシールをはがします。検体を採取した綿棒を検体抽出液に浸し、よく攪拌します。

2



チューブの外側から綿球部分を指でつまんで「もむ」ようにし、採取した検体をよく絞り出します。

3



チューブをつまんでしごくように綿棒を引き抜き、液を絞り出します。絞り出した液体を検体液とします。

4



付属のフィルター付きノズルを奥まで**しっかり**はめこみます。


5



検体液入りチューブの中程をつまみ、テストカードの検体滴下部に、検体液**3滴**を**ゆっくり**滴下してください。

検体滴下から**15分**静置

■陽性例

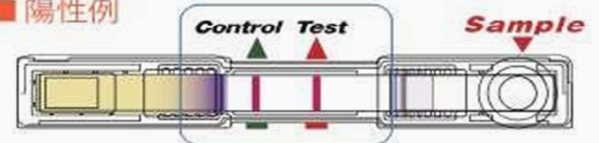

判定部[Control]および判定部[Test]の両方に赤色～紫色のラインが出現した場合には、陽性と判断します。

判定時間は15分

15分より以前に判定部[Control]および判定部[Test]にラインが確認できた場合、その時点で陽性と判定することができます。

## 【判定方法】



陽性例

判定部 [Control] と判定部 [Test] にラインが出現した場合には陽性と判定します。



陰性例

判定部 [Control] のみにラインが出現する場合には陰性と判定します。



判定部 [Control] にラインが認められず、判定部 [Test] にもラインが認められない場合

判定保留例



判定部 [Control] にラインが認められず、判定部 [Test] にラインが認められる場合